



LatinHealth
Group

AG CUFFILL[®]

AnapnoGuard[™]

- **Apariencia de jeringuilla.**
- **Práctico.**
- **Manejo sencillo e intuitivo.**
- Mejora la seguridad del paciente.
- Previene las complicaciones asociadas a la presión del balón en pacientes intubados.
- Medición precisa de la presión del balón y control del volumen.
- La solución en tamaño de bolsillo para todo el personal médico en cualquier entorno clínico.



HOSPITECH
RESPIRATION

Solución innovadora para las vías aéreas

AG CUFFILL®

AnapnoGuard™

Solución innovadora para las vías aéreas

El dispositivo compacto e intuitivo AG CUFFILL® es la solución más precisa para medir tanto la presión como el volumen de aire del balón de neumotaponamiento en todo el entorno clínico.

Su tamaño de bolsillo y diseño con apariencia de jeringuilla, permiten un simple y fácil uso para el profesional sanitario en unidades de cuidados intensivos, emergencias y terapia respiratoria domiciliaria.

AG CUFFILL® está diseñado para mejorar la seguridad en el paciente intubado, minimizando los posibles errores humanos al medir o inflar el neumo, así como eliminando el riesgo de contaminación cruzada.

Instrucciones de uso

Al Intubar al Paciente

- Lleve hacia atrás el émbolo de AG CUFFILL® hasta alcanzar el volumen que quiera aplicar en el neumo.
- Encienda AG CUFFILL®.
- Conecte la punta de AG CUFFILL® al tubo.
- Lenta y progresivamente, lleve el émbolo de AG CUFFILL® hasta la presión deseada. La pantalla mostrará la presión en tiempo real.


Verificar la Presión del Neumo

- Lleve el émbolo de AG CUFFILL® hasta el final (a fondo).
- Encienda AG CUFFILL®.
- Conecte la punta de AG CUFFILL® al tubo. En la pantalla aparecerá el número que indica la presión existente en ese momento en el neumo.

Ajustar la Presión del Neumo

Si quiere ajustar la presión, tras haberla verificado:

- Lleve moderadamente el émbolo hacia atrás.
- Encienda AG CUFFILL®.
- Conecte la punta de AG CUFFILL® al tubo.
- Tire del émbolo para extraer aire o empujelo para introducir aire.

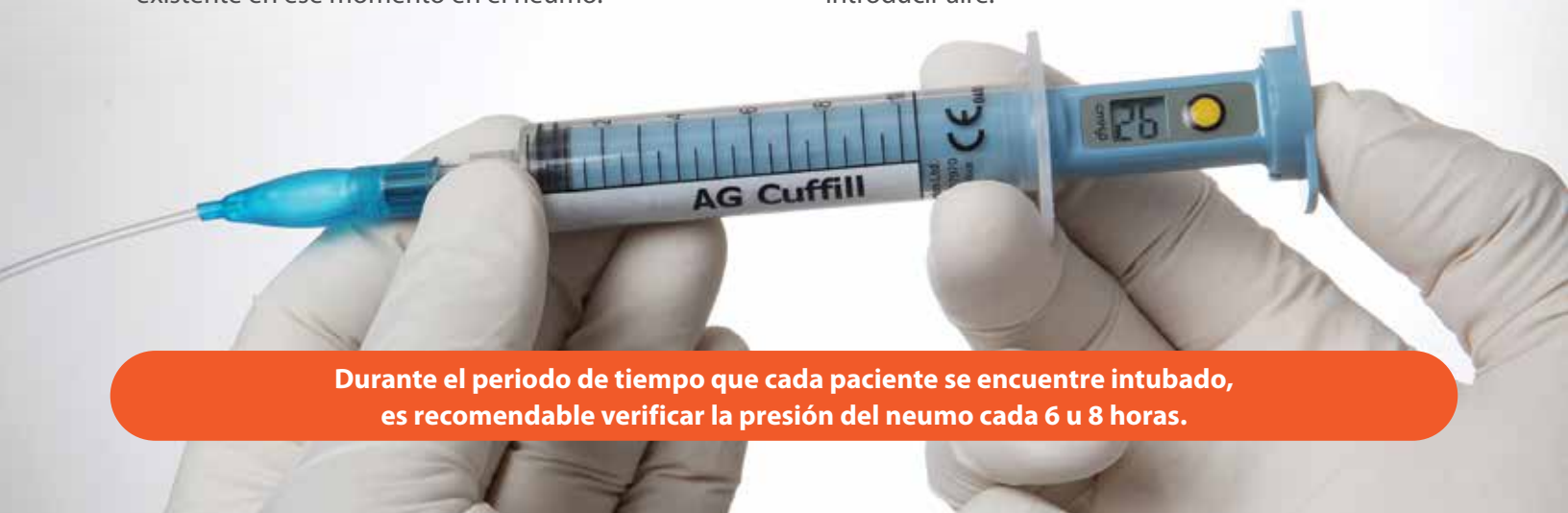

Durante el periodo de tiempo que cada paciente se encuentre intubado, es recomendable verificar la presión del neumo cada 6 u 8 horas.